



Rencontrez votre coéquipier !

Maquet Corin

Table d'opération mobile

Intuitive, sûre, intelligente et connectée

GETINGE ✱

GETINGE ✱



Table d'opération mobile Maquet Corin Le bloc opératoire intelligent de demain, disponible dès aujourd'hui

Maquet Corin est une table d'opération mobile, intelligente et connectée qui peut aider à simplifier les processus dans la routine quotidienne de vos services de chirurgie. Restez pleinement concentré sur les patients en sachant que votre table d'opération fournit un retour visuel intuitif qui a pour but d'aider à gérer les risques. Installation et positionnement des patients qui tend vers un accès amélioré au site et une bonne ergonomie. En bref, Maquet Corin est votre coéquipier qui vise à vous aider à :

- + Faciliter le travail d'équipe et la communication
- + Assurer la protection des personnes
et des équipements
- + Gagner du temps
- + Rester flexible
- + Rester connecté

→ En savoir plus

Le coeur de votre bloc opératoire

Découvrir Maquet Corin

Arrêt immédiat

en cas de détection de collision sous la table.

Assistance en chirurgie bariatrique

grâce à une capacité de charge allant jusqu'à 545 kg.

Connectivité sans fil avancée

grâce à un ordinateur interne.

Positionnement adapté

par un réglage multidirectionnel simultané.

Transport rapide du patient

à l'aide des options motorisées et des réglages de la table pendant que la table est déverrouillée.

Protection contre

la surcharge de la table qui est assurée par des capteurs intégrés.

Revêtement Sanitized® intégré

pour une protection supplémentaire.

Coussins IPC ou SFC

pour le confort du patient tout en réduisant les complications.

→ [En savoir plus](#)

Positionnement sûr

grâce à la prévention du basculement

Guidage intuitif de l'utilisateur par code couleur


qui permet d'associer la télécommande à ux témoins lumineux des articulations.





Laissez les couleurs communiquer

Des messages clairs vous informent


Maquet Corin a pour but de faciliter le travail d'équipe et la communication pendant une intervention chirurgicale. Les témoins lumineux situés aux quatre articulations de la table d'opération fournissent un retour visuel immédiat pour toute l'équipe chirurgicale, même lorsque la table d'opération est couverte.

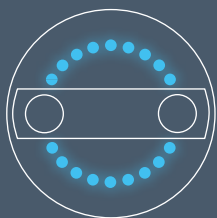


i Informations sur l'orientation du patient/indication de la position de l'articulation (si couverte)

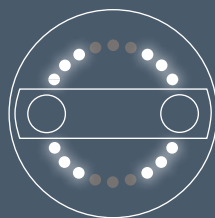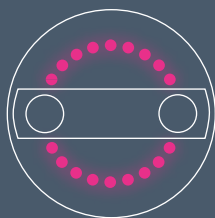


↔ Mouvement en cours

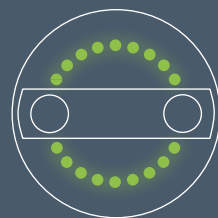

✓ Position cible atteinte

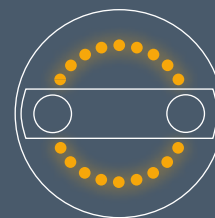

→ Limite de mouvement atteinte

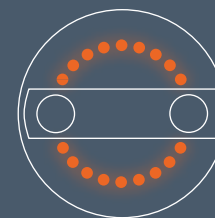

⚠ Mise en garde



Des codes couleur
clairs permettent
de faire correspondre
la télécommande et
les témoins lumineux
avec les articulations.



Maquet Corin tend à protéger les personnes et les équipements

Restez concentré sur le patient


Évitez les erreurs de sens grâce à des commandes intuitives telles que les témoins lumineux et les signaux sonores.

- Le système de détection des collisions protège non seulement l'équipe du bloc opératoire travaillant autour de la table d'opération, mais aussi tous les équipements souvent placés sous la table, tels que les amplificateurs de brillance ou les systèmes de réchauffement du patient.
- La détection de surcharge protège la table d'opération contre les dommages structurels.
- La protection antibasculement vise à garantir un positionnement sûr du patient, même en position déverrouillée ou avec les patients les plus corpulents en chirurgie bariatrique. La possibilité d'ajuster la table en position déverrouillée a pour but d'offrir de la flexibilité au personnel du bloc opératoire et sécurité aux patients pendant leur positionnement et leur transport, améliorant ainsi l'efficacité et la facilité des procédures.
- Le minuteur de décubitus vous aide à vous rappeler quand un patient doit être repositionné pendant une intervention plus longue.

Revêtement Sanitized® intégré pour une protection supplémentaire

Les soufflets en caoutchouc sont traités avec la fonction d'hygiène antibactérienne Sanitized®, qui contribue à réduire la prolifération bactérienne à la surface.

De plus, les surfaces en acier inoxydable poli limitent l'adhérence des bactéries et la prolifération des micro-organismes.

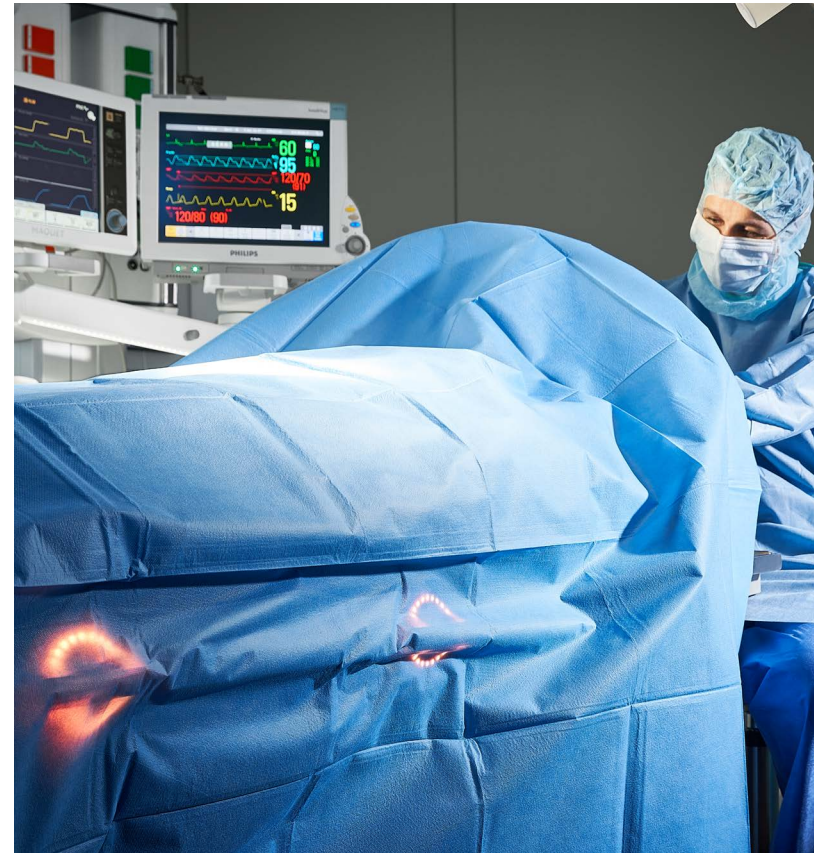




Gagnez du temps avec Maquet Corin

Vers une assistance tout au long du flux de travail du bloc opératoire

- Configurez jusqu'à 30 séquences utilisateur personnalisées avec jusqu'à 40 points de passage : enregistrez votre parcours individuel pour un positionnement en douceur du patient.
- Positions chirurgicales courantes prédéfinies telles que semi-assise, flex, réflexe, dos horizontal et examen.
- Diverses possibilités de mouvements simultanés qui ont pour but de permettre un ajustement rapide et précis dans les positions adaptées à la procédure.
- La reconnaissance automatique et l'indication de l'orientation du plateau de la table grâce aux témoins lumineux tendent à vous aider à éviter les erreurs et sont visibles même à travers le champ stérile.
- Vers un transport du patient amélioré : la table d'opération peut être réglée lorsqu'elle n'est pas verrouillée afin de maintenir la réactivité pendant le transport lorsque des positions d'urgence sont nécessaires. Les fonctions Auto Drive et Sensor Drive facilitent le transport des patients.

Jusqu'à 40 points de passage individuels programmables pour chaque séquence d'utilisateur.



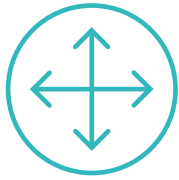

Un éventail de possibilités Maquet Corin tend à vous permettre de rester flexible

Maquet Corin est une table qui s'adapte à plusieurs spécialités. Elle peut être utilisée pour la chirurgie générale ainsi que pour des disciplines spécialisées telles que la chirurgie bariatrique.

- Positions de Trendelenburg et Trendelenburg inversé jusqu'à 45°.
- Inclinaison latérale jusqu'à 28°.
- Combinaison élevée de Trendelenburg et d'inclinaison : 30° / 20°.
- Réglages en hauteur de 580 mm à 1 120 mm visant une bonne ergonomie pendant la procédure chirurgicale.
- Les mouvements simultanés ont pour but de permettre un ajustement rapide et précis dans des positions adaptées pour l'intervention:
 - Hauteur et plaque dorsale / hauteur et plaque jambière.
 - Déplacement longitudinal et hauteur.
 - Trendelenburg et mouvement de la plaque dorsale.
- L'interface standardisée peut être utilisée avec les tables d'opération Maquet Meera, Otesus et Yuno II.
- Accès aux procédures hybrides et de navigation : grâce à l'interface dédiée, la table d'opération Maquet Corin est également adaptée à la chirurgie hybride et de navigation car elle permet la fixation d'une plaque en fibre de carbone dans le but d'offrir une longue zone radiotransparente en 3D et un bon accès aux appareils d'imagerie mobiles tels que les amplificateurs de brillance et les tomodensitomètres.





Un éventail de possibilités Maquet Corin tend à vous permettre de rester flexible


Accès à la chirurgie bariatrique.

Transformez facilement votre table d'opération Maquet Corin en table bariatrique :

- grâce à une capacité de charge élevée, jusqu'à 545 kg,
- grâce à un ensemble bariatrique dédié aux personnes de grande taille, composé d'un plateau de table agrandi,
- combinée à des éléments de rembourrage très épais et très larges (760 mm de largeur).

En outre, il est possible de fixer des repose-bras et des porte-jambes.



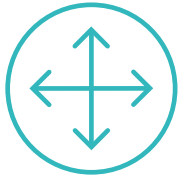

Un éventail de possibilités Maquet Corin tend à vous permettre de rester flexible

Facilement convertible en table d'opération spécialisée grâce à l'adaptateur de traction.

Un bon positionnement peut faire la différence dans les interventions orthopédiques, en permettant le recours à des techniques moins invasives susceptibles d'améliorer les résultats pour les patients et d'accélérer leur rétablissement.

Getinge a établi une norme pour prendre en charge les applications spécialisées en orthopédie et en traumatologie, permettant l'hyperextension, l'abduction, l'adduction et la rotation des jambes.


Domaines d'application

- Arthroplastie totale de la hanche par voie antérieure directe / remplacement.
- Vis dynamique de la hanche / Fixation de la hanche.
- Arthroscopie de la hanche.
- Fracture du bassin.
- Enclouage fémoral.
- Plaque fémorale.

Concentrez-vous sur votre patient tout en allégeant votre charge de travail.
Faciliter vos interventions en orthopédie et en traumatologie.

→ En savoir plus



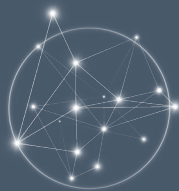

Restez connecté Avec FleetView

Dans le bloc opératoire, avec un accès facile et rapide à une vue d'ensemble des ressources en ligne


- Mode d'emploi HTML et PDF.
- Ressources et liens.
- Détails sur la table d'opération et état.

Grâce à la table d'opération connectée, le personnel biomédical et les techniciens de maintenance peuvent facilement accéder à un large éventail de données de maintenance et de statistiques d'utilisation. Veillez à ce que la table soit toujours prête à fonctionner en cas d'intervention chirurgicale.

En ligne,
via le portail web FleetView.

- Optimisez la disponibilité des équipements dans votre bloc opératoire.
- Entretien et maintenance simplifiés.
- Assistance à distance rapide assurée par Getinge.
- Des machines opérationnelles, prêtes à l'emploi.
- Aperçu de l'état du parc installé.
- Notifications instantanées.
- Informations tirées des statistiques d'utilisation.

→ En savoir plus

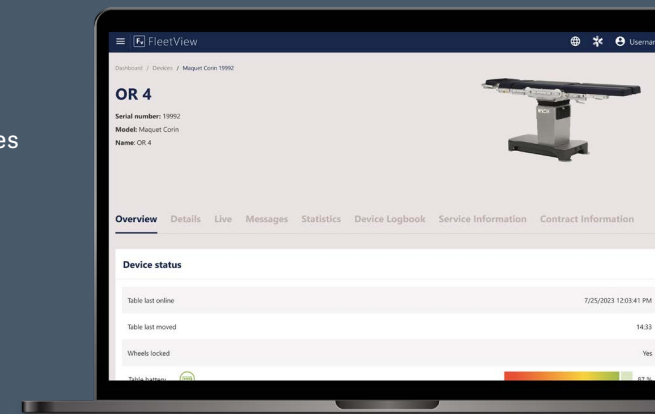

Caractéristiques techniques

Découvrez Maquet Corin en détail

Dimensions


Longueur du plateau de base	892,5 mm $\pm$ 5 mm
Largeur du plateau de base	548 mm $\pm$ 5 mm
Largeur du plateau de base avec rails porte-accessoires	590 mm $\pm$ 10 mm
Hauteur (sans coussin)	580–1 120 mm $\pm$ 10 mm

Capacité de charge

Capacité de charge maximale	545 kg
Capacité de charge maximale pendant le transport	300 kg

Plage de réglage

Déplacement longitudinal	460 mm $\pm$ 5 mm
Positions de Trendelenburg/Trendelenburg inversée	45° $\pm$ 3°
Combinaison Trendelenburg/inclinaison	30°/20°
Inclinaison latérale gauche/droite	28° $\pm$ 3°
Extension de la plaque dorsale, haut	90° $\pm$ 2°
Extension de la plaque dorsale, bas	90° $\pm$ 2°
Plaque jambière, haut	90° $\pm$ 2°
Plaque jambière, bas	110° $\pm$ 2°

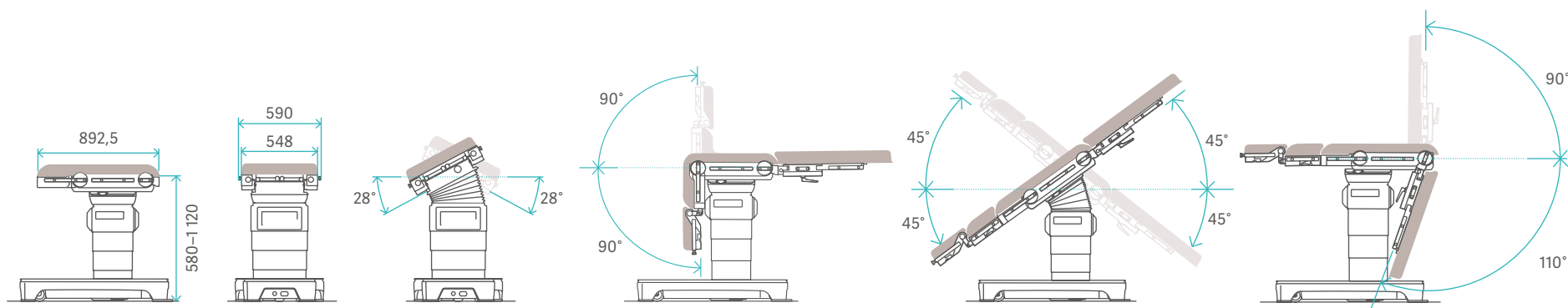


Caractéristiques techniques

Adaptée pour l'accès à l'imagerie

Avec plaque CF insérable

1160.45xx

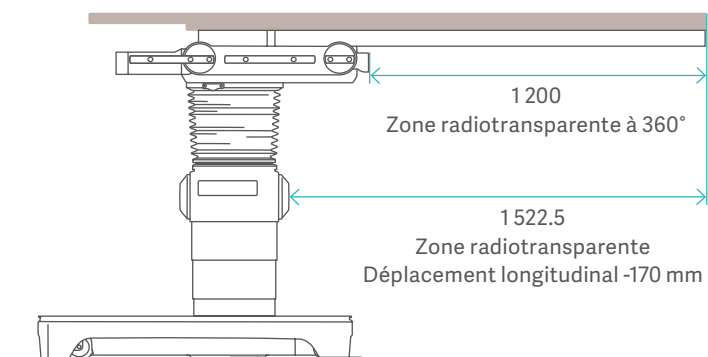

Toutes les dimensions sont en mm.





Caractéristiques techniques

Adaptée pour l'accès à l'imagerie

Avec accessoires/modules standard orientés normalement

(1160.32/55xx, 1160.53/64xx, 1160.50xx)

Articulation totale possible.

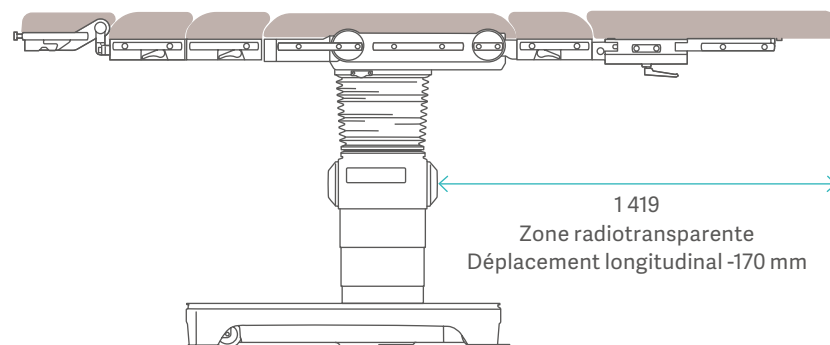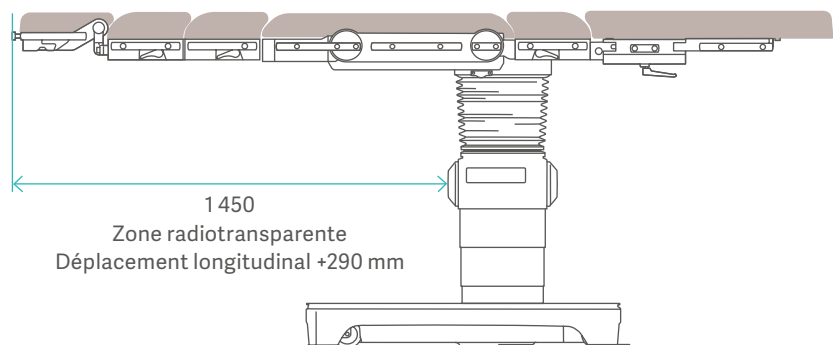

Toutes les dimensions sont en mm.



Caractéristiques techniques

Adaptée pour l'accès à l'imagerie

Avec accessoires/modules standard inversés

(1160.32/55xx, 1160.53/64xx, 1160.50xx)

Articulation totale possible.

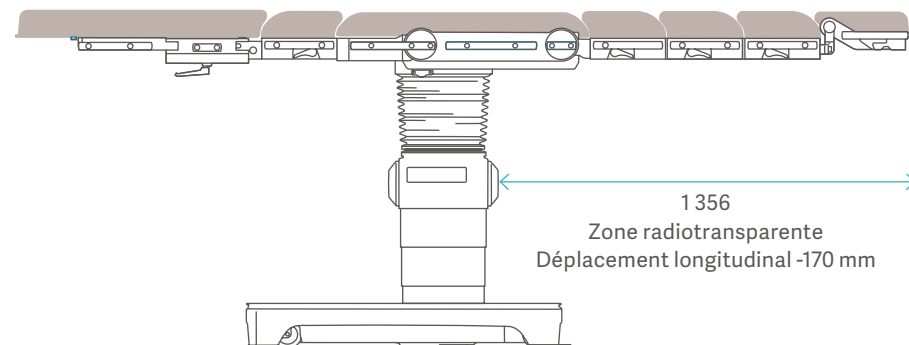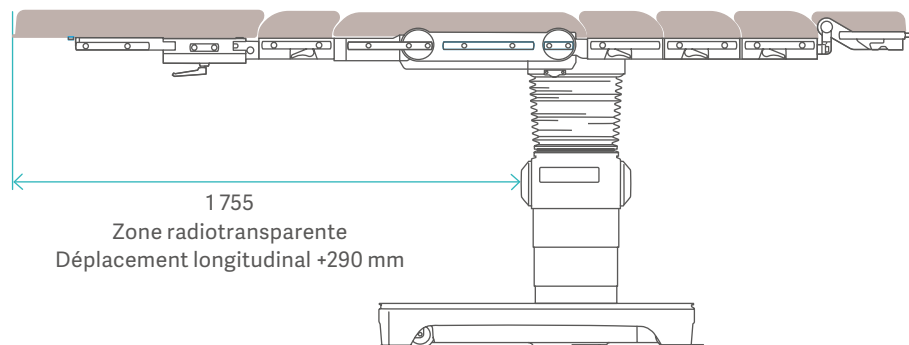

Toutes les dimensions sont en mm.

Mention légales :

Table d'opération mobile Maquet Corin - Table d'opération mobile destinée à positionner le patient en vue d'une intervention chirurgicale juste avant, pendant et après la phase opératoire ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

SENSOR DRIVE (1009.69XX) - Accessoire sans fil permettant de commander les fonctions motorisées de certaines tables d'opérations mobiles Maquet, avec ou sans le patient juste avant et après la phase opératoire. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

Table d'opération MEERA (7200.01) – Table d'opération mobile destinée à positionner le patient en vue d'une intervention chirurgicale juste avant, pendant et après la phase opératoire ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

Système de table d'opération OTESUS (1160.01XX) – Système de table d'opération, conçu pour l'adaptation de plateau opératoire transfert pluridisciplinaire compatible, destiné pour le positionnement d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

YUNO II – Table d'opération mobile destinée au positionnement d'un patient en vue d'une intervention chirurgicale juste avant, pendant et après la phase opératoire. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

Adaptateur d'extension (1003.72AC) - Adaptateur conçu pour installer la plaque d'extension en fibre de carbone (1433.66AC / 1433.66BC) et la barre d'extension (1007.40B0 / 1007.41B0) pour le positionnement d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits.

PUB-2023-0687-C, version de juillet 2026.

Ces informations sont destinées à un public international hors des États-Unis.

Ces informations s'adressent exclusivement aux professionnels de santé ou à d'autres publics professionnels et sont fournies à titre purement informatif ; elles ne sont pas exhaustives et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut au mode d'emploi, au manuel d'entretien ou à un avis médical. Getinge décline toute responsabilité quant à toute action ou omission de quiconque fondée sur ce document, et l'utilisateur s'engage à en assumer l'entière responsabilité.

Il se peut que certains traitements, solutions ou produits mentionnés ne soient pas disponibles ou autorisés dans votre pays. Ces informations ne peuvent être copiées ou utilisées, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Getinge.

Getinge France - société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

Fabricant : Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · info@getinge.com

© 2026 Getinge | Getinge and **GETINGE** ✱ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées.
DMS-0004121-v3 | Tous droits réservés.

GETINGE ✱